


Gestos Pantallas Táctiles


Los “gestos” son toques en la pantalla que tienen asignada una función. Para entenderlos, podemos considerar la pantalla dividida en 4 cuadrantes, como en la siguiente imagen (hemos asignado un número a cada cuadrante). Cada gesto funciona sólo en su cuadrante.

1

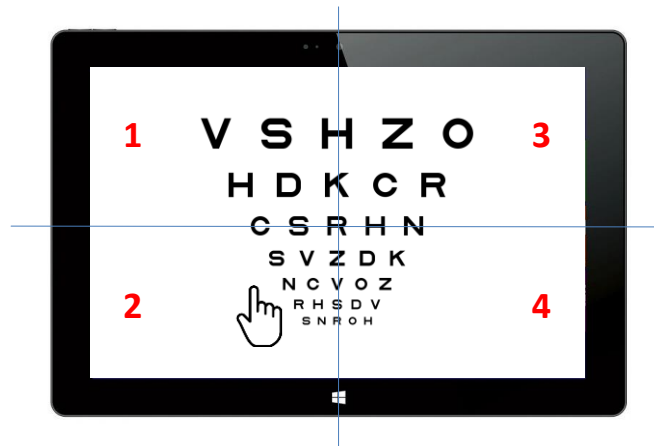


Por ejemplo, las 4 teclas de las flechas (arriba, abajo, izquierda y derecha) son las más utilizadas en el manejo de los tests de la Unidad. Por eso hemos asignado al cuadrante izquierdo de abajo (C-2) las funciones de esas flechas: basta con deslizar el dedo por la pantalla en el sentido de la flecha que queremos usar. Esto es muy útil para manejar los tests de Agudeza Visual, Disparidad de Fijación, Estereoagudeza o la Sensibilidad al Contraste, entre otros, así como para responder a los ejercicios de Terapia Visual.


Cuando estamos dentro de un test, podemos deslizar el dedo por la pantalla para conseguir las principales acciones.

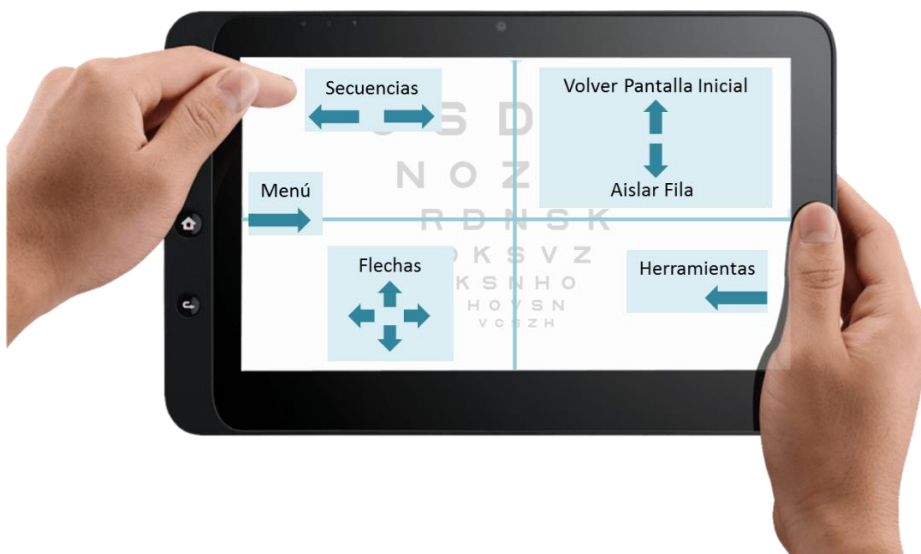


Veamos algunos ejemplos de los gestos más útiles en la siguiente tabla:

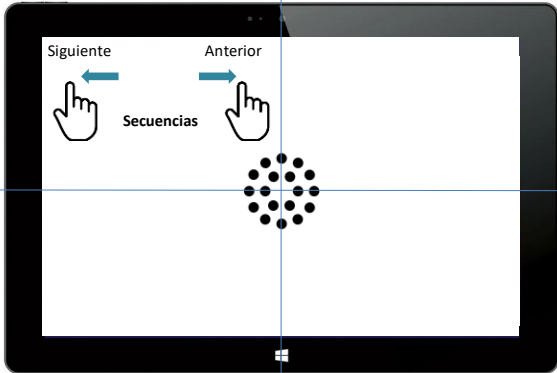


Pasar a otro test de la secuencia grabada (C-1)

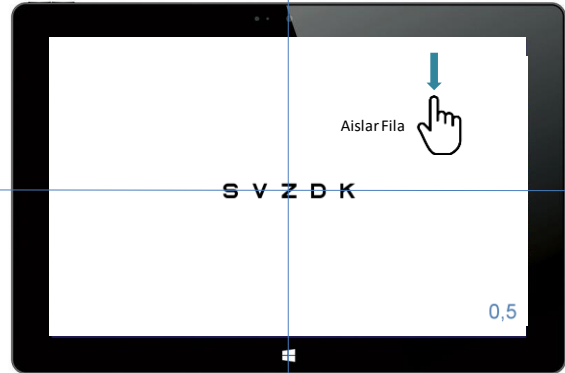


Aislar una fila en los test de AV (C-3)

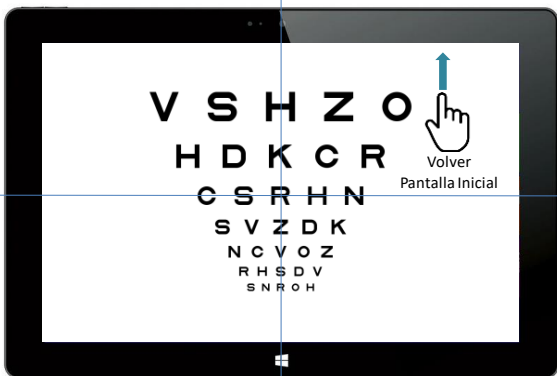


Volver a la pantalla inicial (C-3)

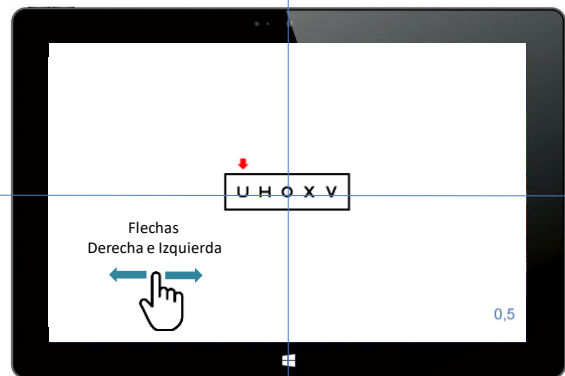

Flechas derecha e izquierda, por ejemplo, para mover la flecha roja de izquierda a derecha (C-2)

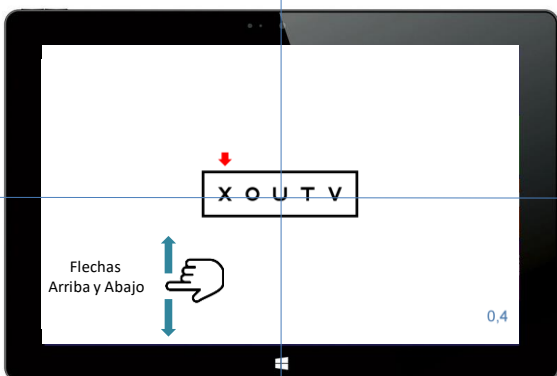

Flechas arriba y abajo por ejemplo para aumentar el tamaño de las letras (C-2)

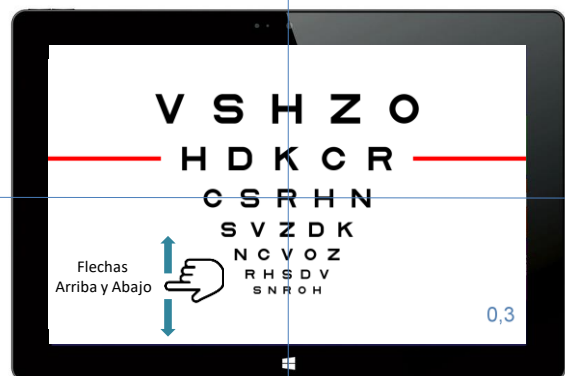

Flechas arriba y abajo, por ejemplo, para seleccionar filas (C-2)

Manejar la Unidad de lejos

Por último, también es posible utilizar los gestos táctiles en la Tablet cuando está conectada como mando remoto a la pantalla de lejos:

