



Rejilla de Amsler

La última sección del grupo de Salud Ocular está dedicada a los tests para evaluar la función neuro-macular en visión próxima.

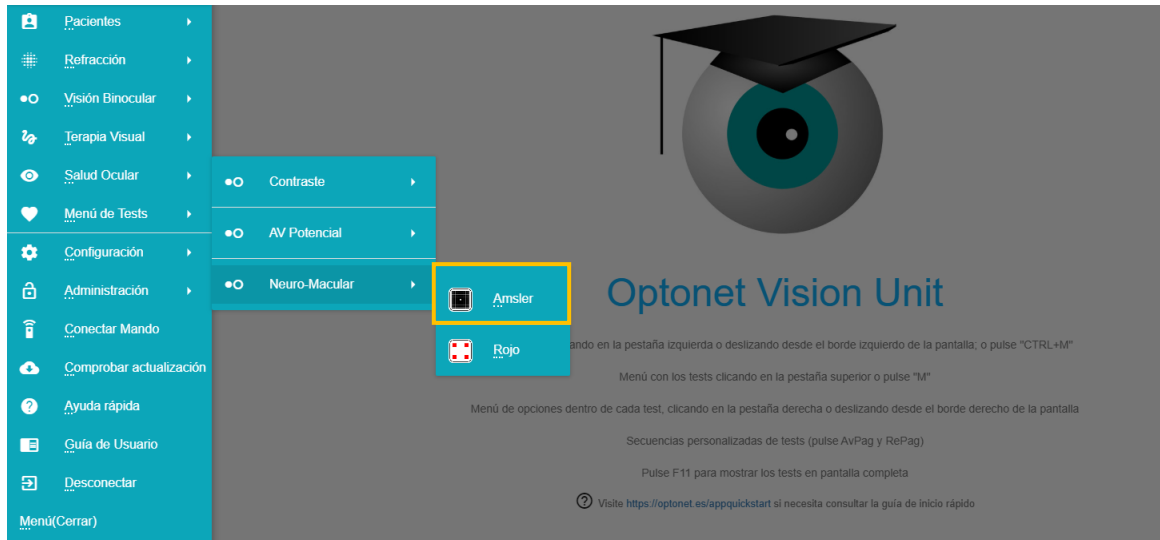


La Unidad incorpora una rejilla de Amsler convencional de líneas blancas sobre fondo negro, con un punto blanco de fijación central. La separación entre las líneas equivale a 1 grado, para la distancia de visión próxima seleccionada.

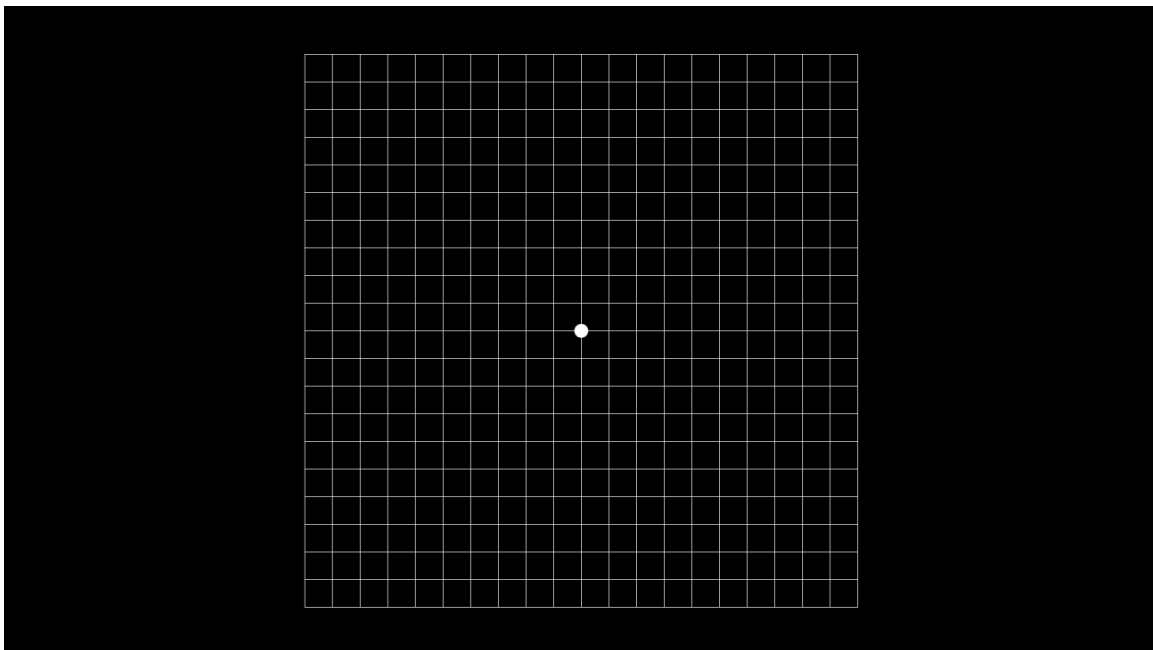


La rejilla de Amsler evalúa los 10 grados centrales del campo visual

Menú de Herramientas


El menú de herramientas incluye un primer icono para reducir a la mitad la separación entre las líneas (es decir a 0,5 grados), con el objetivo de aumentar la sensibilidad del test.

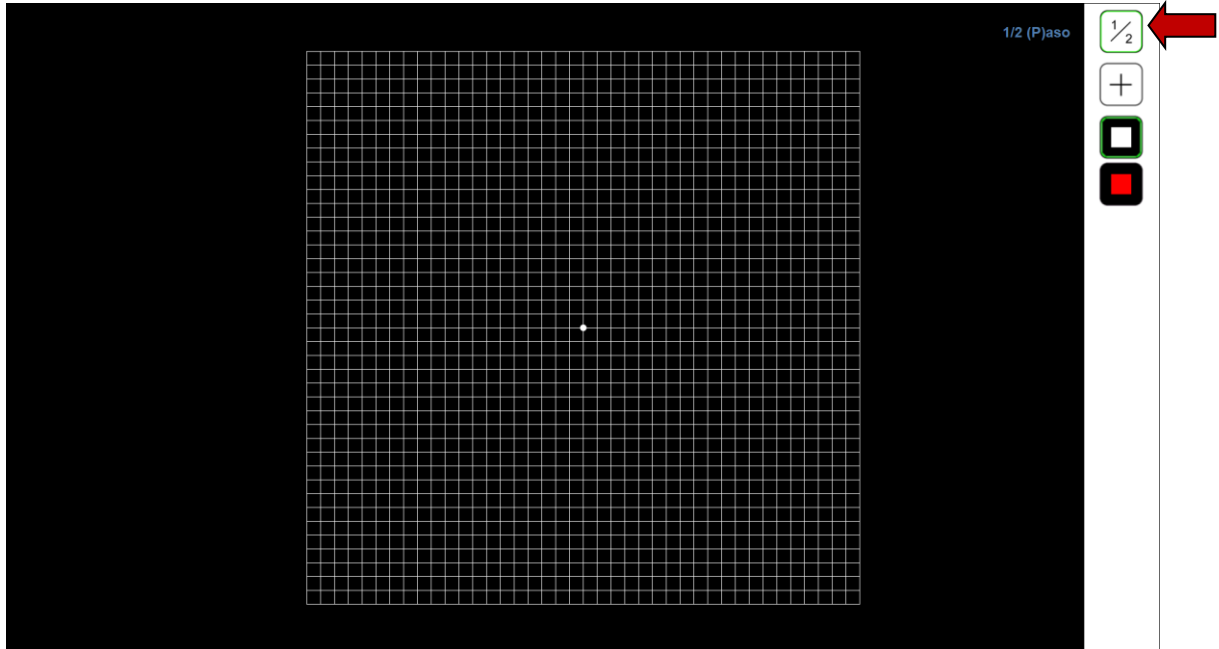

El siguiente icono (Cruz) añade 2 líneas diagonales para ayudar en la fijación de los pacientes con escotoma central.

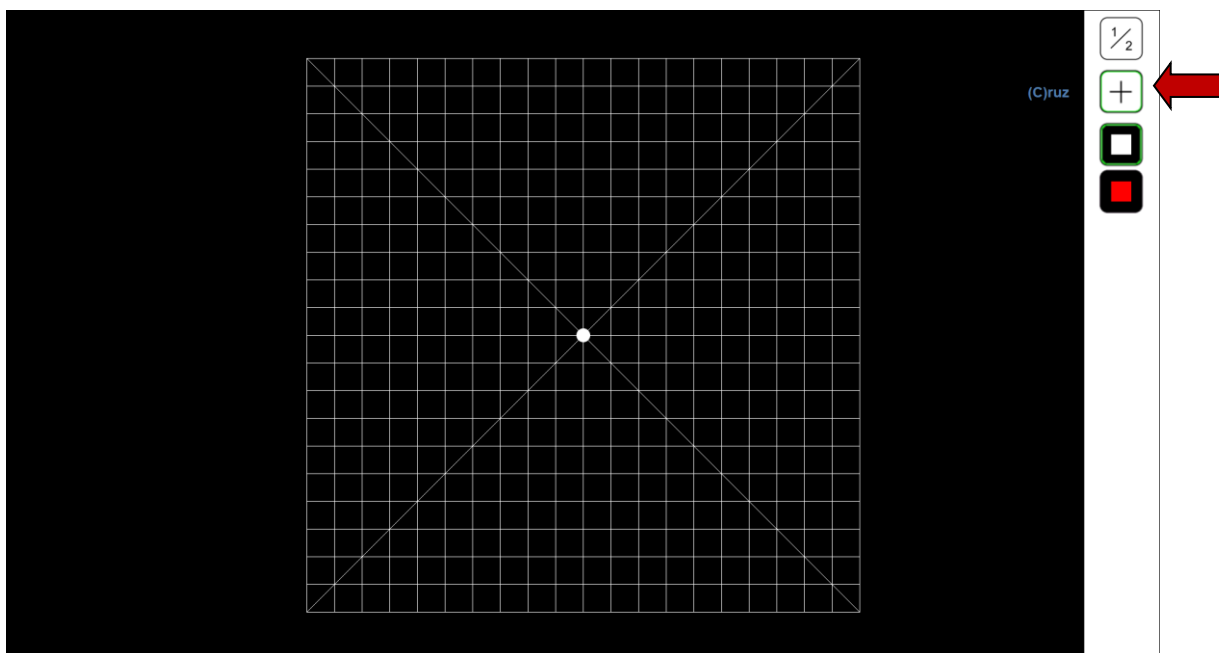

El menú de herramientas incluye también un icono para cambiar el color de las líneas a negro y el fondo a blanco:

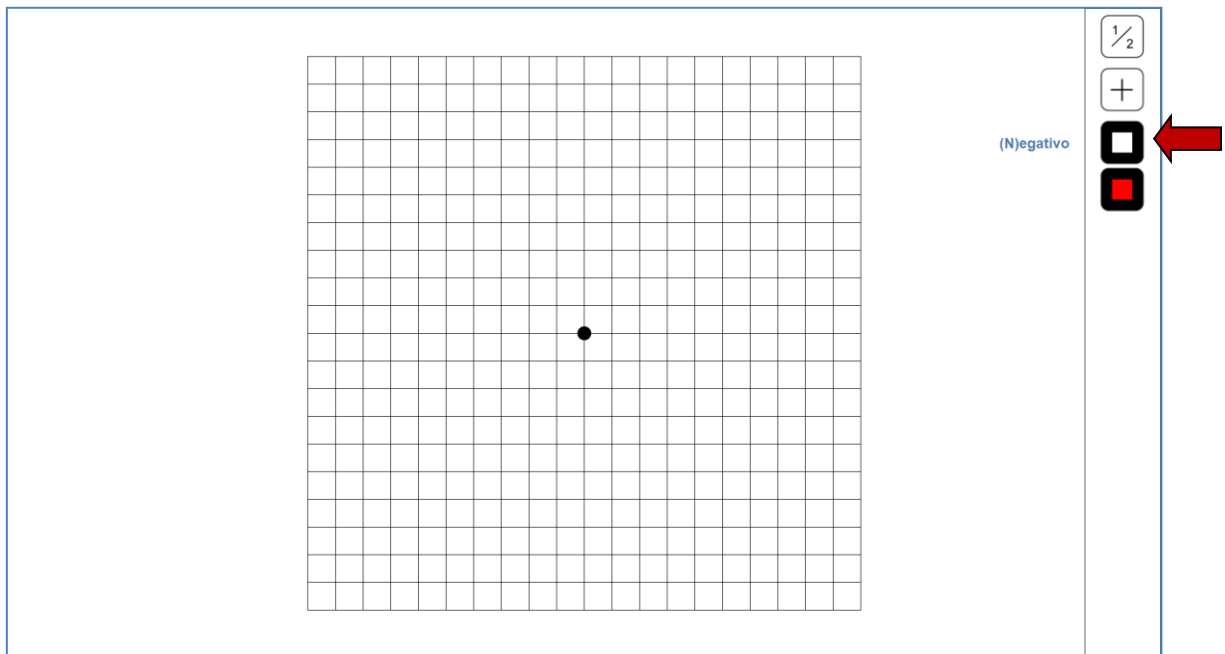

Y un último icono para cambiar el color de las líneas a rojo y el fondo a negro, para detectar escotomas de color que pueden producirse en maculopatías tóxicas, neuropatías ópticas y lesiones en el quiasma, por ejemplo:

