

Protocolo Medida AV Bajo Contraste

Abre el test de AV a bajo contraste y mantén una iluminación tenue. A continuación, aísla la columna central del optotipo, pulsando en la flecha izquierda ← del teclado.

Usa la flecha hacia abajo ↓ del teclado para ir señalando cada letra con líneas rojas a los lados, empezando por la más grande. Pide al paciente que lea la letra señalada y ve bajando con la flecha hasta que cometa un error*. Sube a la última letra que vio, con la flecha hacia arriba ↑.

Pulsa de nuevo en la flecha "←" para volver al optotipo completo y pide al paciente que lea todas las letras de esa fila señalada. Si comete algún fallo, sube a fila superior (flecha hacia arriba ↑), hasta que lea bien las 5 letras (5 aciertos).

Entonces pulsa en el teclado el número de aciertos (5 aciertos). Las líneas rojas bajan entonces un nivel de forma automática. Pide al paciente que lea la nueva fila señalada. Pulsa de nuevo en el teclado el número de letras acertadas (de 0 a 5).

Repite sucesivamente, hasta que el programa muestre el resultado de la medida de la AV en la pantalla (ocurre cuando sólo tiene 1 o 0 aciertos; o cuando llegamos a la última fila del optotipo: AV 2,0 Dec).

Si deseas repetir la medida, pulsa la tecla "Intro" y el programa señalará de forma automática la fila de letras por donde comenzamos antes y cambiará la disposición de las letras para evitar que el paciente las memorice. Si tomas varias medidas, el programa calculará el valor medio ± DE. Cuando quieras pasar al otro ojo, pulsa "Esc". Si quieres cambiar las letras en cualquier momento, pulsa "Z".

*No aceptamos que el paciente diga que no ve una letra de alguna fila. Hay que animarle a que adivine qué letra cree que es, aunque se equivoque. Esto es importante en el sistema ETRS.

Recuerda al paciente que no debe entrecerrar los ojos cuando no vea las letras.

