



Vergencias

Pasamos ahora al apartado de Vergencias, donde encontramos dos enlaces que nos llevan, respectivamente a una columna vertical y a una fila horizontal de letras de AV 0,5 decimal. Estas líneas de letras se pueden utilizar como estímulo a la hora de realizar la prueba de vergencias fusionales verticales y horizontales respectivamente, mediante el diasporámetro o la barra de prismas.

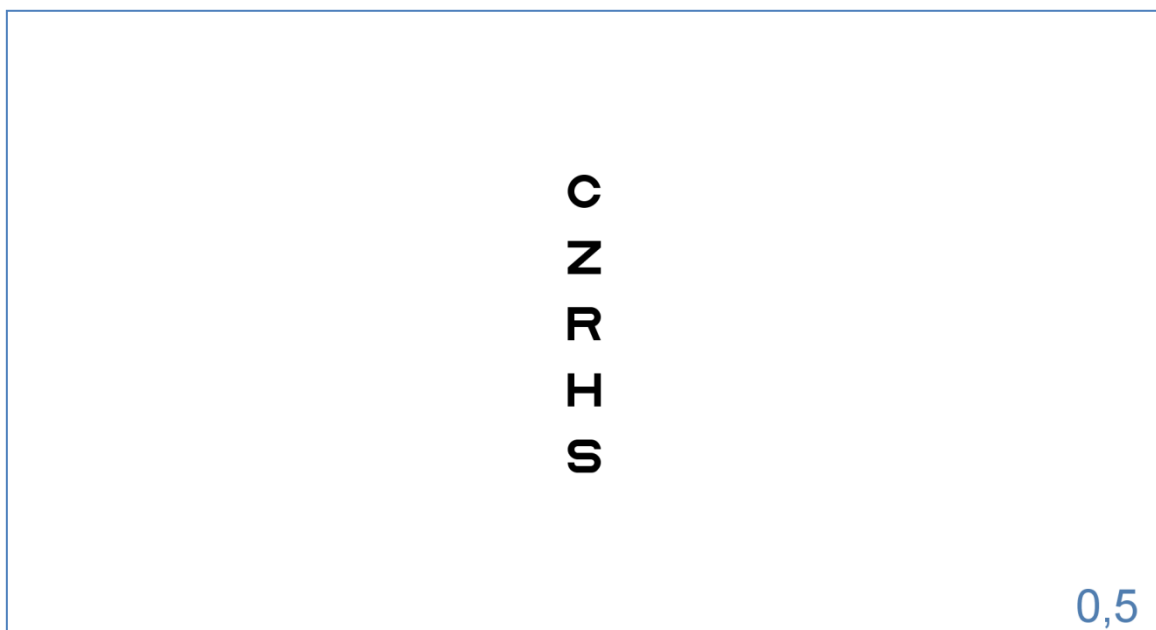

Columna vertical

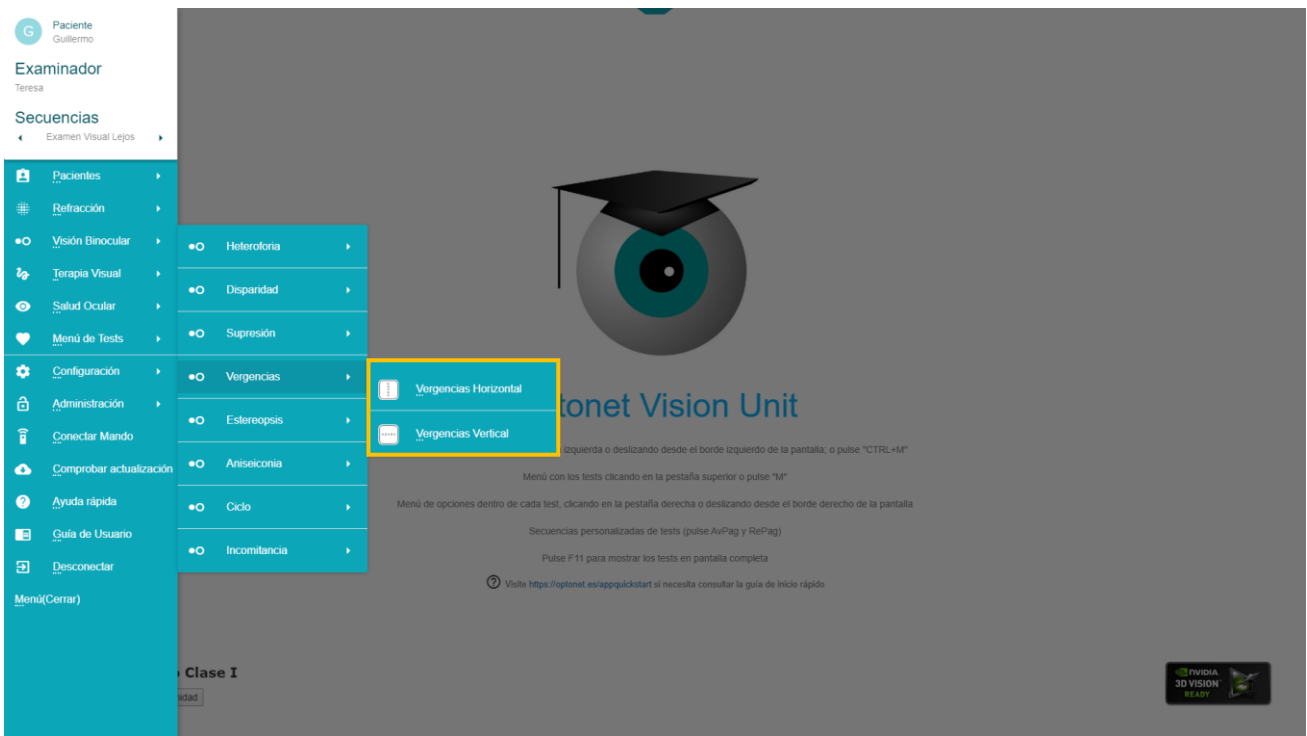

Fila horizontal

Esta fila y columna podrían utilizarse también para la medida de la heteroforia horizontal y vertical, con la técnica de von Graefe.

Como es habitual, el test dispone de una pareja de botones de zoom para modificar el tamaño de las letras en pasos de 0,1 log (podemos también utilizar las teclas "+" y "-"). El tamaño elegido en la última ejecución del programa quedará guardado para la siguiente sesión de forma automática.

Si queremos variar la combinación de letras podemos utilizar el icono correspondiente del menú de herramientas, o la letra "Z" del teclado. Para volver a las letras iniciales disponemos de otro icono, o también podemos pulsar la letra "X".